


# Dispositivo Cardinal Health™ SVED®

## Guía de consulta rápida para profesionales clínicos

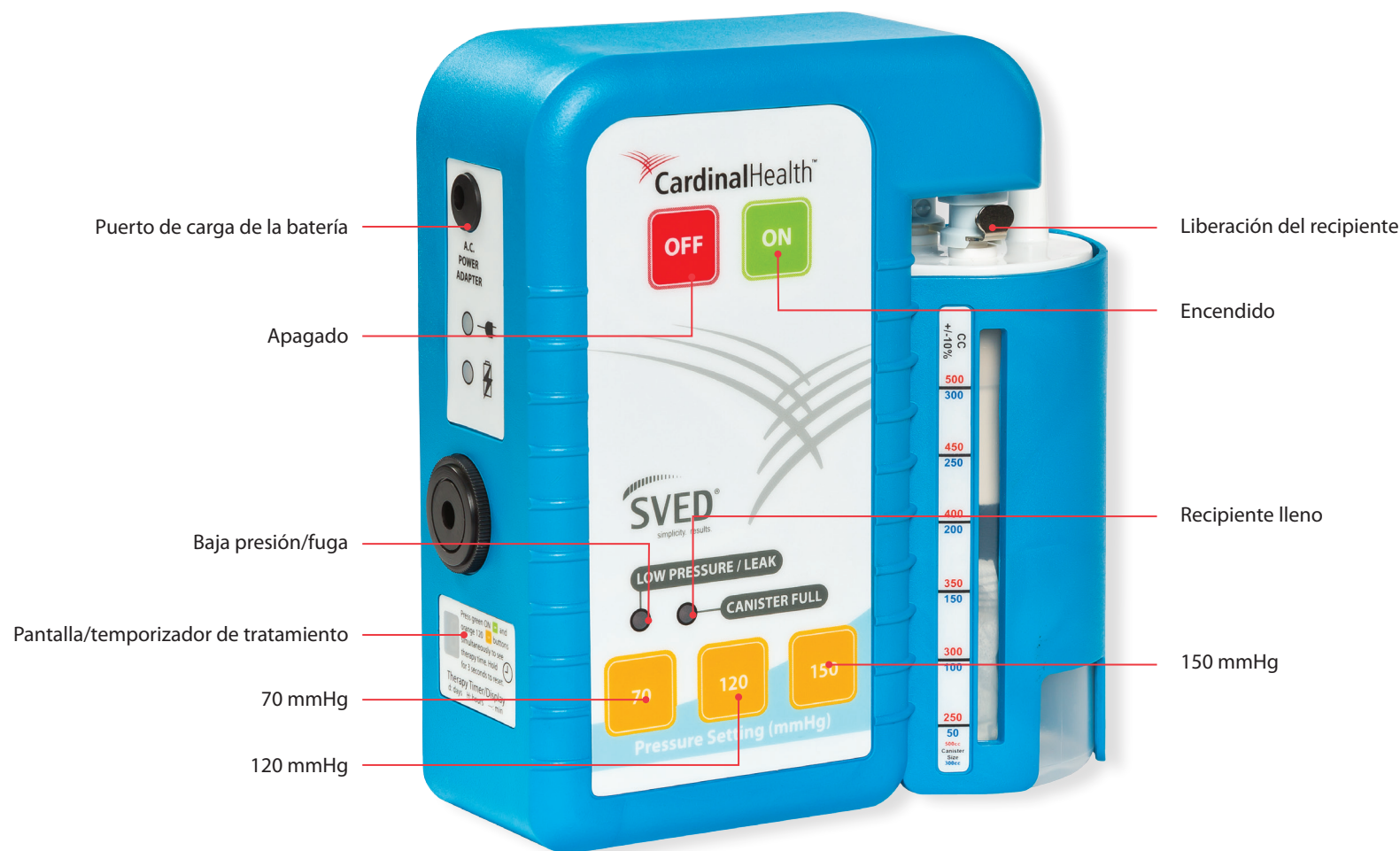

**CardinalHealth™**

**NOTA:** Consulte el manual de usuario para profesionales clínicos del dispositivo Cardinal Health™ SVED® para obtener instrucciones detalladas y revisar los apartados de precauciones y contraindicaciones antes de utilizar este dispositivo.

### Conexión a la corriente

Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada. Enchufe el cable de alimentación en el lado izquierdo del dispositivo. Una luz verde indica que el dispositivo está recibiendo alimentación y una luz ámbar, que la batería se está cargando.

### Colocación del recipiente

Introduzca el recipiente en el soporte situado en la parte derecha del dispositivo deslizándolo desde abajo. Alinee los dos puertos con el receptáculo y presione hasta que encaje en su posición con un clic y quede bloqueado. Para retirar el recipiente, presione el botón de liberación situado encima de la ventana de visualización del recipiente, sujete el recipiente por la base y tire hacia abajo. Los recipientes son de un solo uso.

### Colocación del apósito

Conecte el extremo azul del tubo SpeedConnect™ al puerto abierto del recipiente. Empuje el conector girándolo con suavidad para ajustarlo correctamente. Asegúrese de que la pinza del tubo SpeedConnect™ está abierta.

**NOTA:** Consulte el manual de usuario para profesionales clínicos del dispositivo Cardinal Health™ SVED para obtener instrucciones sobre cómo cubrir la herida correctamente y solucionar los posibles problemas.

### Encendido del dispositivo

Pulse el botón de encendido **ON** para iniciar el tratamiento. Seleccione el nivel de aspiración deseado pulsando el botón del ajuste de presión correspondiente **70** **120** **150** (70, 120 o 150 mmHg). El botón de ajuste de presión parpadeará hasta que se alcance la presión deseada, y en ese momento la luz quedará encendida.

### Bloqueo del tratamiento

Para bloquear el ajuste de tratamiento, mantenga pulsado el botón de ajuste de presión **70** que desee durante 3 segundos. El dispositivo emitirá tres pitidos para indicar que se ha bloqueado el ajuste de tratamiento. Repita el proceso para desbloquear el ajuste de tratamiento.

### Modo intermitente

Para utilizar el dispositivo en modo intermitente, mantenga pulsado el botón de ajuste de presión que desee **70** y pulse un momento el botón de apagado **OFF**. El botón de encendido **ON** empezará a parpadear y el dispositivo emitirá dos pitidos para indicar que está funcionando en modo intermitente. Suelte ambos botones. Repita el proceso para volver al modo continuo.

### Alarmas para la solución de problemas

Si el dispositivo emite una alarma, consulte la tabla de solución de problemas disponible en el reverso de esta página para identificar la alarma y corregirla.

### Apagado del dispositivo

Para apagar el dispositivo, pulse el botón de apagado **OFF**.

**Si tiene alguna pregunta o desea información, póngase en contacto con Cardinal Health en el número 1 866 484 6798.**









**Aviso para usuarios:** Al igual que sucede con cualquier otro producto sanitario, si no se siguen las instrucciones del producto o si se configuran los ajustes y se aplica el tratamiento sin la orden expresa o la supervisión de un cuidador profesional formado, el producto podría no funcionar adecuadamente y provocar lesiones graves o mortales.

**Desfibrilación:** Si es necesario realizar una desfibrilación en el área donde se aplicó el apósito, retírelo para evitar que inhiba la transmisión de corriente eléctrica o la reanimación del paciente.

#### Resonancia magnética (RM):

El dispositivo Cardinal Health™ SVED® no es compatible con procedimientos de RM. No lo introduzca en el área de RM.

**Oxigenoterapia hiperbárica (OHB):** No introduzca nunca un dispositivo —ni apagado ni encendido— en una cámara hiperbárica. Es necesario desconectar el dispositivo del paciente antes de aplicar la oxigenoterapia hiperbárica.

Mensaje o sonido	Problema	Solución	Más información
<p><b>El botón de apagado</b>  <b>parpadea y se oye un pitido.</b></p>	El nivel de batería es bajo.	Enchufe el dispositivo Cardinal Health™ SVED®.	<p>Una luz verde en el enchufe y el dispositivo Cardinal Health™ SVED® indica que el dispositivo está recibiendo alimentación.</p> <p>Una luz ámbar indica que la batería se está cargando.</p>
<p><b>El indicador “LOW PRESSURE / LEAK” se ilumina y se oye un pitido.</b></p> <p><b>El botón de ajuste de presión</b>  <b>parpadea.</b></p> <p><b>El dispositivo hace más ruido.</b></p>	Hay una fuga de aire en la conexión del tubo o el apósito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque una pinza en el tubo.</li> <li>Si el LED de baja presión/fuga y la alarma sonora se restablecen, significa que hay una fuga por debajo de la pinza (normalmente en el apósito). Vuelva a abrir la pinza antes de corregir la fuga. Presione suavemente el contorno del paño quirúrgico para comprobar si hay fugas. Si encuentra alguna fuga, cúbrala con otro trozo de paño.</li> <li>Si el LED de baja presión/fuga y la alarma sonora continúan, significa que hay una fuga por encima de la pinza. Compruebe la conexión del tubo en el recipiente. Asegúrese de que el recipiente esté totalmente asentado y bloqueado. Compruebe si el recipiente presenta grietas o la tapa está levantada en algún punto. Si es así, reemplácelo.</li> <li>Abra la pinza.</li> </ul>	<p>Una vez que haya detectado y sellado la fuga, la alarma se restablecerá, la luz del botón de ajuste de presión dejará de parpadear y el dispositivo funcionará de forma silenciosa.</p> <p>Las fugas suelen producirse en zonas donde la piel está húmeda, en pliegues o arrugas de la piel y en pliegues del paño. Pueden ocurrir si el paño se engancha en la ropa o las sábanas.</p>
<p><b>El indicador “CANISTER FULL” se ilumina y se oye un pitido.</b></p>	El recipiente está lleno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque una pinza en el tubo.</li> <li>Pulse el botón de apagado  para apagar el dispositivo.</li> <li>Presione el botón de liberación del recipiente (situado encima de este) y deslice el recipiente lleno para retirarlo. Tápelos y deséchelos adecuadamente. Coloque el nuevo recipiente y alinee los puertos. Oirá un clic cuando el recipiente encaje en su posición.</li> <li>Abra la pinza y pulse el botón de encendido  para reanudar el tratamiento.</li> </ul>	<p>La alarma de recipiente lleno empieza a emitirse cuando se alcanza el 90 % de su capacidad, pero el dispositivo seguirá funcionando hasta que el recipiente se llene por completo.</p> <p>Si se coloca un dispositivo Cardinal Health™ SVED® sobre su parte delantera, cuando entre líquido en el recipiente se activará una falsa alarma de recipiente lleno y será necesario reemplazar el recipiente.</p>
<p><b>El ajuste de presión no cambia.</b></p>	El bloqueo de presión está activado.	Desbloquee el dispositivo.	<p>Para bloquear el ajuste de tratamiento, mantenga pulsado el botón de ajuste de presión  que desee durante 3 segundos. El dispositivo emitirá tres pitidos para indicar que se ha bloqueado el ajuste de tratamiento.</p> <p>Repita este proceso para desbloquear el dispositivo.</p>
<p><b>El dispositivo no hace ningún ruido y el líquido no se mueve dentro del tubo.</b></p>	Esto no es un problema.	<p>No es necesario hacer nada.</p> <p>Puede utilizar el modo intermitente para extraer el líquido del tubo de forma que vaya hacia el recipiente.</p>	<p>Cuando el apósito está bien sellado, el líquido puede extraerse de la herida y permanecer en el tubo. La espuma se comprimirá de la forma normal y el dispositivo no hará ningún ruido.</p> <p>Consulte las indicaciones que se proporcionan más adelante para cambiar al modo intermitente.</p>
<p><b>El botón de encendido</b>  <b>parpadea.</b></p>	Esto no es un problema. El dispositivo Cardinal Health™ SVED® está funcionando en modo intermitente.	No es necesario hacer nada.	<p>En el modo intermitente, la presión objetivo se mantiene durante 5 minutos y se reduce a 25 mmHg durante 2 minutos.</p> <p>Para cambiar del modo continuo al intermitente, mantenga pulsado el botón de ajuste de presión encendido  y pulse el botón de apagado . Repita este procedimiento para volver al modo continuo.</p>