

Dispositivo Cardinal Health™ SVED®

Guía de consulta rápida para pacientes

Acerca de su dispositivo Cardinal Health™ SVED®

Su médico ha elegido el dispositivo Cardinal Health™ SVED® para extraer líquido de su herida mediante un método de aspiración controlada. No obstante, es importante que observe con atención la herida y el dispositivo Cardinal Health™ SVED® para asegurarse de que el dispositivo funciona correctamente. A continuación se incluyen información importante y algunas preguntas que debe plantear al profesional sanitario.

NOTA: Consulte el manual de usuario para pacientes del dispositivo Cardinal Health™ SVED® para obtener instrucciones detalladas y revisar los apartados de precauciones y contraindicaciones antes de utilizar este dispositivo.



Información importante sobre su dispositivo Cardinal Health™ SVED®

- Evite que el dispositivo Cardinal Health™ SVED® se moje. Coloque una pinza en el tubo y desconéctelo del recipiente cuando se vaya a duchar o bañar.
- El dispositivo Cardinal Health™ SVED® debe estar enchufado a la corriente siempre que sea posible para mantener la carga de la batería al 100 %. Cuando salga de casa, lleve el cable de alimentación consigo.
- Mantenga el dispositivo Cardinal Health™ SVED® en posición vertical para evitar que se active una falsa alarma de recipiente lleno.
- El dispositivo Cardinal Health™ SVED® debe estar encendido en todo momento, a menos que la herida sangre o así se lo indique el profesional sanitario.
- No modifique los ajustes del dispositivo Cardinal Health™ SVED® a menos que se lo indique el profesional sanitario.

Preguntas para el profesional sanitario

- Cómo puede saber si su apósito o su dispositivo Cardinal Health™ SVED® presentan algún problema.
- Qué debe hacer si tiene algún problema relacionado con su apósito o este tiene una fuga.
- Qué debe hacer si observa sangrado en la herida.
- Qué debe hacer si tiene que retirar el apósito.
- Qué actividades puede realizar mientras utiliza el dispositivo Cardinal Health™ SVED®.
- A quién debe llamar si necesita ayuda.
- Qué cuidados necesita el dispositivo Cardinal Health™ SVED®.

Aviso para usuarios: Al igual que sucede con cualquier otro producto sanitario, si no se siguen las instrucciones del producto o si se configuran los ajustes y se aplica el tratamiento sin la orden expresa o la supervisión de un cuidador profesional formado, el producto podría no funcionar adecuadamente y provocar lesiones graves o mortales.

Desfibrilación: Si es necesario realizar una desfibrilación en el área donde se aplicó el apósito, retírelo para evitar que inhiba la transmisión de corriente eléctrica o la reanimación del paciente.

Resonancia magnética (RM): El dispositivo Cardinal Health™ SVED® no es compatible con procedimientos de RM. No lo introduzca en el área de RM.

Oxigenoterapia hiperbárica (OHB): No introduzca nunca un dispositivo —ni apagado ni encendido— en una cámara hiperbárica. Es necesario desconectar el dispositivo del paciente antes de aplicar la oxigenoterapia hiperbárica.

Cambio del recipiente

1. Coloque una pinza en el tubo para cerrarlo.
2. Pulse el botón **OFF** para apagar el dispositivo.
3. Retire el tubo SpeedConnect™ azul de la parte superior del recipiente. Gire el conector cónico para facilitar la extracción del tubo de aspiración del recipiente.
4. Para retirar el recipiente, presione el botón de liberación plateado situado encima del recipiente, sujete el recipiente por la base y tire hacia abajo.
5. Tape el recipiente y deséchelo de conformidad con las normativas locales, estatales y federales. Pregunte al profesional sanitario cuál es la forma correcta de desechar un recipiente usado.
6. Para colocar un recipiente nuevo, sujételo por la base e introdúzcalo en el soporte deslizándolo hacia arriba.
7. Alinee los dos puertos y presione hacia arriba hasta que encaje en su posición con un clic.
8. Vuelva a conectar el tubo SpeedConnect™ al recipiente. Empuje el conector cónico azul girándolo con suavidad para introducirlo en el puerto abierto del recipiente hasta que esté bien ajustado.
9. Pulse el botón **ON** para encender el dispositivo y reanudar el tratamiento.
10. Vuelva a abrir la pinza del tubo.

Alarmas para la solución de problemas

Si el dispositivo emite una alarma, consulte la tabla de solución de problemas disponible en el reverso de esta página para identificar la alarma y corregirla.

Encendido del dispositivo

Pulse el botón de encendido **ON** para iniciar el tratamiento.

Apagado del dispositivo

Para apagar el dispositivo, pulse el botón de apagado **OFF**.

Si tiene alguna pregunta o desea información, póngase en contacto con Cardinal Health en el número 1 866 484 6798.

Mensaje o sonido	Problema	Solución	Más información
<p>El botón de apagado  parpadea y se oye un pitido.</p>	El nivel de batería es bajo.	Enchufe el dispositivo Cardinal Health™ SVED®.	<p>Una luz verde en el enchufe y el dispositivo Cardinal Health™ SVED® indica que el dispositivo está recibiendo alimentación.</p> <p>Una luz ámbar indica que la batería se está cargando.</p>
<p>El indicador “LOW PRESSURE / LEAK” se ilumina y se oye un pitido.</p> <p>El botón de ajuste de presión  parpadea.</p> <p>El dispositivo hace más ruido.</p>	Hay una fuga de aire en la conexión del tubo o el apósito.	<ul style="list-style-type: none"> Coloque una pinza en el tubo. Si el LED de baja presión/fuga y la alarma sonora se restablecen, significa que hay una fuga por debajo de la pinza (normalmente en el apósito). Vuelva a abrir la pinza antes de corregir la fuga. Presione suavemente el contorno del paño quirúrgico para comprobar si hay fugas. Si encuentra alguna fuga, cúbrala con otro trozo de paño. Si el LED de baja presión/fuga y la alarma sonora continúan, significa que hay una fuga por encima de la pinza. Compruebe la conexión del tubo en el recipiente. Asegúrese de que el recipiente esté totalmente asentado y bloqueado. Compruebe si el recipiente presenta grietas o la tapa está levantada en algún punto. Si es así, reemplácelo. Abra la pinza. 	<p>Una vez que haya detectado y sellado la fuga, la alarma se restablecerá, la luz del botón de ajuste de presión dejará de parpadear y el dispositivo funcionará de forma silenciosa.</p> <p>Las fugas suelen producirse en zonas donde la piel está húmeda, en pliegues o arrugas de la piel y en pliegues del paño. Pueden ocurrir si el paño se engancha en la ropa o las sábanas.</p>
<p>El indicador “CANISTER FULL” se ilumina y se oye un pitido.</p>	El recipiente está lleno.	<ul style="list-style-type: none"> Coloque una pinza en el tubo. Pulse el botón de apagado  para apagar el dispositivo. Presione el botón de liberación del recipiente (situado encima de este) y deslice el recipiente lleno para retirarlo. Tápelos y deséchelos adecuadamente. Coloque el nuevo recipiente y alinee los puertos. Oirá un clic cuando el recipiente encaje en su posición. Abra la pinza y pulse el botón de encendido  para reanudar el tratamiento. 	<p>La alarma de recipiente lleno empieza a emitirse cuando se alcanza el 90 % de su capacidad, pero el dispositivo seguirá funcionando hasta que el recipiente se llene por completo.</p> <p>Si se coloca un dispositivo Cardinal Health™ SVED® sobre su parte delantera, cuando entre líquido en el recipiente se activará una falsa alarma de recipiente lleno y será necesario reemplazar el recipiente.</p>
<p>El ajuste de presión no cambia.</p>	El bloqueo de presión está activado.	Desbloquee el dispositivo.	<p>El profesional sanitario ha bloqueado su dispositivo para evitar que se realicen cambios en el tratamiento por accidente.</p> <p>Solicite ayuda al profesional sanitario.</p>
<p>El dispositivo no hace ningún ruido y el líquido no se mueve dentro del tubo.</p>	Esto no es un problema.	<p>No es necesario hacer nada.</p> <p>Si desea mover el líquido hacia el recipiente, pregunte al profesional sanitario si puede utilizar el modo intermitente.</p>	<p>Cuando el apósito está bien sellado, el líquido puede extraerse de la herida y permanecer en el tubo. La espuma se comprimirá de la forma normal y el dispositivo no hará ningún ruido.</p>
<p>El botón de encendido  parpadea.</p>	Esto no es un problema. El dispositivo Cardinal Health™ SVED® está funcionando en modo intermitente.	No es necesario hacer nada.	<p>En el modo intermitente, la presión objetivo se mantiene durante 5 minutos y se reduce a 25 mmHg durante 2 minutos.</p>